

F3.2 gebruik van mondk masker

# Communitymasker M-DOX-A1

P1

Masker overeenkomstig de aanbevelingen in het technisch NBN-document  
(NBN/DTD S 65-001:2020, version 28 Avril 2020)

**Instructies om het masker te dragen:**

Afbeeldingen louter ter illustratie



Stap 1: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u het masker aanraakt

Stap 2: Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten

Stap 3: Houd het masker vast met de neusuitsparing naar boven gericht

Stap 4: Houd beide oorlussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze achter de oren, zodat het masker neus, mond en kin bedekt

Stap 5: Vorm of knijp in de neusbrug om zich aan te passen aan de vorm van uw neus.

**Instructies om het masker te verwijderen:**

Afbeeldingen louter ter illustratie



Stap 1: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u het masker aanraakt

Stap 2: Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijks besmet is. Raak alleen de oorlussen aan

Stap 3: Houd beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op om het masker te verwijderen

Stap 4: Gooi het masker in een gesloten wasmand;

Stap 5: Was uw handen gedurende ten minste 30 seconden met water en zeep voordat u iets anders aanraakt.

**Instructies en gegevens van de fabrikant:**

- Ref. artikel : Community Mask M-DOX-A1
- Inhoud van de verpakking: 5 stuks, kleur: wit.
- Maat: **M** (Medium)
- Het product is OEKO-TEX gecertificeerd.



- Samenstelling: 3 lagen over elkaar geplaatste vezels, twee gemaakt van 65% polyester en 35% katoen en een 100% polyester
- Het masker heeft een filtercapaciteit van minstens 70 % voor vaste of vloeibare deeltjes met een grootte van 3 µm.



- Wasbeurt: handwas, temperatuur: maximum 30 °C.
- Aan de lucht laten drogen om de vezels niet te beschadigen.
- Niet in de wasmachine wassen, geen droogkuis en niet strijken.

- Het masker kan 30 wasbeurten doorstaan. Daarna is de doeltreffendheid niet meer gegarandeerd.